

血液サンプル送付の手順

1.キットの内容

- 指示シート
- 検査申込書
- 患者同意書
- 記入済みの返送用ラベル
- バーコード付きPAXgeneサンプルチューブおよび予備のバーコード
- 小型エアクッションバッグ
- バイオハザードバッグ
- 小型段ボール箱
- 返送用梱包材

2.必須フォームの記入

- 患者同意書の再確認
 - 患者の署名 - **必須**
- 検査申込書の記入
 - 医師の署名 - **必須**
- 結果の開示承認書の記入
 - 患者の署名 - **必須 (MyGenomeウェブアプリケーションからの閲覧用)**

3.サンプルの採取 (採血)

- キットに同梱のバーコード付きPAXgeneチューブに以下を記入：
 - 採血日
 - 採血時間
 - 患者のイニシャル
 - 患者の生年月日
- 4~8 mLを採血

4.検査のためにサンプルをイルミナ臨床サービスラボへ発送

- キットに同梱の梱包材で採血済みPAXgeneチューブを包装
 - サンプルチューブを小型エアクッションバッグに入れる
 - 小型エアクッションバッグに入れたチューブをバイオハザードバッグに入れる
 - バイオハザードバッグを段ボール箱に入れる
- 段ボール箱およびすべての書類を返却用梱包材に入れる
 - 署名済み同意書 (患者/代理人の署名必須)
 - 署名済み検査申込書 (1ページに記載の発注する医師の署名)
 - 署名済みのMyGenomeウェブアプリケーションへの結果の開示承認書
- 返送用ラベルが外側に貼付されていることを確認
- サンプルの集荷または地域のFedEx事業所への持ち込みを手配

イベントに関する質問は、uyg@illumina.com にお問い合わせください。

サンプルの提出に関する質問は、genomicservices@illumina.com にお問い合わせください。